



一次性使用 多功能引流管

产品特点


- 聚亚安酯材质, 良好的弹性和抗弯折性, X光下显影清晰
- 创新亲水涂层, 具有极高的生物相容性, 有效降低插入阻力
- 穿刺导入套针与引流管贴合性好
- 超大侧孔腔设计, 引流效果显著
- 锥形头端构造, 减少组织损伤和病人痛苦

主要临床应用部位: 胸腹腔引流、肝胆引流、泌尿系统引流等


产品组件




使用方法

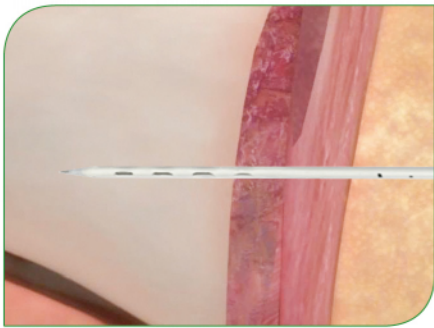

1 影像引导下, 将组装好的引流管直接穿刺到引流中心位置

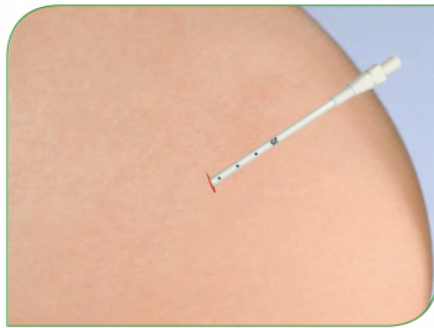

2 退出针芯, 见腔内积液流出后(外套管引流管保留于腔内)

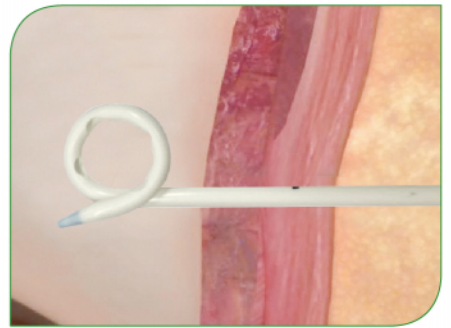

3 影像引导下调整到管孔段位置, 固定引流管, 连接引流袋

订货信息

产品直径	产品长度
8Fr	30cm
10Fr	30cm
12Fr	30cm
14Fr	30cm
16Fr	30cm

注册证名称: 一次性使用输尿管引流管

北京德迈特科技发展有限公司
Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd
北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室
010-84195180
www.germanmedtech.com



关注德迈特医疗